

Genómica Reproductiva

Procedimiento para el Transporte de Muestras

niPGT KIT
Test Genético Preimplantacional
No Invasivo

El procedimiento consiste de 7 pasos:

1

Solicitud de kits para niPGT

La clínica contacta a Biocódices por email a: **info@biocodices.com** o por teléfono al: **+54114753-0183** para solicitar:

- El kit conteniendo los tubos con buffer para la conservación de la muestra (Yikon Genomics).
- El kit de transporte de Biocódices.

NOTA. Puede transportar un máximo de 10 muestras por caso, un control negativo y un blanco del procedimiento. Este kit contiene etiquetas para identificar: los tubos, el formulario de muestras y el kit de envío.

2

Envío de los kits a la clínica

La clínica recibirá los kits a través de un transporte de muestras biológicas autorizado. El transporte del kit con el buffer se realizará a -20°C .

NOTA. Es importante que la clínica mantenga este kit sin abrir y a -20°C hasta su uso. El kit de envío de Biocódices puede mantenerse a temperatura ambiente.

3

Entubado de la muestra biológica

El profesional responsable del laboratorio procederá a la recolección del medio de cultivo (*según protocolo correspondiente*) y su traspaso a uno de los tubos del kit de Yikon Genomics.

Cada tubo será colocado en uno de los orificios del kit de Biocódices para su transporte. Cada kit de Biocódices transportará las muestras de un único caso y hasta dos controles

NOTA. Todas las muestras biológicas deben corresponder de forma unívoca a un único embrión del caso.

4

Etiquetado de tubos y del kit de envío

Rotule cada tubo del caso con una de las 10 etiquetas (código de muestra) del kit de envío de Biocódices.

Asegúrese que la etiqueta coincida con el código que ingresará en el formulario de muestra (FM) del caso. El kit de envío de Biocódices debe quedar identificado con una de las etiquetas del caso (código de caja). Péguela en la faja de seguridad y cierre la caja para su envío. Asegúrese de colocar la segunda etiqueta en el formulario de muestras (FM) del caso. Complete también la etiqueta que se encuentra en el dorso de la caja, con el nombre del paciente y de su Clínica.

NOTA. Una vez rotulados los tubos y el kit de envío, ciérrelo firmemente y guárdelo a -20°C hasta su envío. No olvide rotular los controles (CN y BL).

5

Completado de formularios

La clínica debe completar los formularios por cada caso:

- Formulario de Consentimiento Informado para Pacientes (CI)
- Formularios de Solicitud de Estudio y Muestras (FSE/FM)



FORMULARIOS



CONSENTIMIENTO

Los formularios deben descargarse desde los códigos QR o link de descarga de nuestra página web: **<https://www.biocodices.com/forms-nipgta.html>**

Luego completarlos de forma digital (sin firmar) en Acrobat Reader y enviarse por email a **laboratorio@biocodices.com** para permitir la carga de datos automática en nuestro sistema. Los formularios completos que identifican el caso deben ser impresos, firmados y abrochados conjuntamente para ser enviados con el kit de transporte biocódices a nuestro laboratorio.

Genómica Reproductiva

Procedimiento para el Transporte de Muestras

niPGT KIT

Test Genético Preimplantacional
No Invasivo

6

Transporte de muestras y formularios

La clínica debe contactar a Biocódices por mail a: info@biocodices.com o por teléfono al: +54114753-0183 para solicitar la recogida de muestras y formularios.

Considere que el transporte llegará a cualquier parte del país en menos de 48 hs. Este transporte proveerá el hielo seco para conservar el kit de transporte a -20°C.

NOTA. Asegúrese de haber completado los pasos 4 y 5 de forma correcta antes de que pase el transporte.

7

Envío de Factura y Resultados

Una vez que la muestra ingrese al laboratorio de biocódices, el departamento administrativo emitirá una factura de forma automática a la clínica. Los resultados serán enviados en formato PDF al mail del responsable que la clínica designe.

Este último paso pone fin al procedimiento. Más abajo podrá repasar estos 7 pasos de forma gráfica.

FORMULARIOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR EL ESTUDIO



Consentimiento Informado para Pacientes (CI)



Formulario de Solicitud de Estudio (FSE)



Formulario de Muestras (FM)

Descargar los formularios aquí. <https://www.biocodices.com/forms-nipgta.html>
 Complételos con Acrobat Reader y **envíe los PDF sin firmas** al mail: laboratorio@biocódices.com
 Imprima los formularios para agregar las firmas, las etiquetas y colóquelos en un sobre.
 Envíe este sobre junto con el (los) kit(s) de envío por caso a través del medio del transporte.

Genómica Reproductiva

Procedimiento para el Transporte de Muestras

niPGT KIT

Test Genético Preimplantacional
No Invasivo

1

Solicitud de kits para niPGT




info@biocodices.com

+54 11 4753-0183


2

Envío de los kits a la clínica

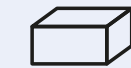

KIT BUFFER -20° C
Yikon Genomics.

+

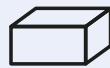

KIT BIOCODICES
POR CASO 10 + CT + BL

→



TRANSPORTE
AUTORIZADO

→



CLINICA IVF

3

Entubado de la muestra biológica



→



4



Etiquetado de tubos y del kit de envío



+

AAA-01

→

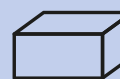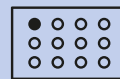

+

PLA DE BARRIDO AAA PLA DE BARRIDO

5

Completado de formularios



CI



FSE/FM

→



laboratorio@biocodices.com



Copia impresa firmada

6

Transporte de muestras y formularios



→



→



→



→

biocódices

7

Envío de Factura y Resultados



→



→



→

